

VISOR DE IMÁGENES

**EASY
VIEW**

FM *Soluciones
Corporativas FM SAS.*

MANUAL DE USUARIO

FM

Powered by *Soluciones
Corporativas FM SAS.*

EASYVIEW

EasyView es un visor de imágenes diagnósticas 100% web, multiplataforma, de alta disponibilidad y seguridad.

VISOR DE IMÁGENES



FM Soluciones Corporativas FM SAS.

Número identificación

Nombre Modalidad

Seleccione la modalidad Fecha inicial Fecha final

Registros por página

Identificación	Paciente	Edad	Género	Modalidad	Descripción	Fecha
26570710	TELLO MARIA DEXY	70 años	F		TOMOGRAFIA_COMPUTADA_DE_CRANEOSIMPLE	23/08/2020 22:31:05
1083926965	MEDINA PERDOMO VANESA	22 años	F	CT	TOMOGRAFIA_COMPUTADA_DE_ORBITAS	23/08/2020 21:58:09
1083926965	MEDINA PERDOMO VANESA	22 años	F	CT	TOMOGRAFIA_COMPUTADA_DE_SENOS_PARANASALES_O_CARA	23/08/2020 21:53:00

3D reconstruction of lungs showing anatomical details. The interface includes a sidebar with thumbnails for 'Lung 5.0', 'Body', and 'Lung 11.0'. The main view shows a detailed 3D model of the lungs. The bottom right corner displays technical information: 'Ser: 13', 'Img: 1 / 20', '400 x 400', 'Zoom: 120%', 'W: 255 L: 127', and '360 / Uncompressed'. The top right corner shows 'TOMOGRAFIA_COMPUTADA_DE_TORAX' and 'Aug 24, 2020'.

ACCESO

Al ingresar a la dirección web del **EasyView** este solicitará usuario y contraseña para garantizar la seguridad de la información de los pacientes.

VISOR DE IMÁGENES
EASY VIEW
FM Soluciones Corporativas FM SAS

Usuario

Ingrese el usuario

Contraseña

Ingrese la contraseña

Ingresar

[¿Olvidaste tu cuenta?](#)

PAGINA PRINCIPAL

Una vez iniciada la sesión nos mostrara en la pagina principal la lista de estudios realizado durante el día en curso.

Adicional a esto, esta permite la búsqueda de estudios específicos con la ayuda de los siguientes filtros: Numero de identificación, Nombre, Modalidad (CR, CT, MR, US) y Fecha.

CR -> Rayos X **CT** -> Tomografía **MR** -> Resonancia **US** -> Ecografías

Identificación	Paciente	Edad	Género	Modalidad	Descripción	Fecha
10073704	MADRIGALES JAIME	69 años	M	DX	PORT: CXR	24/08/2020 00:48:29
4947379	CALDERON PENAGOS JAIME	72 años	M	DX	PORT: CXR	24/08/2020 06:27:09
26553210	ARIZA DE PAREDES SATURIA	78 años	F	DX	PORT: CXR	24/08/2020 06:30:50
1007750764	FELIPE MUÑOZ MARTINEZ JHONATHAN	19 años	M	DX	PECHO DE ADULTO: 2 VISTAS	24/08/2020 06:38:47
36110095	FANNY IMBACHI ORTEGA MARIA	69 años	F	DX	PIE: 3 VISTAS	24/08/2020 06:58:12
10073704	MADRIGALES JAIME	69 años	M	CT	TOMOGRAFIA_COMPUTADA_DE_TORAX	24/08/2020 06:11:38
1007750764	FELIPE MUÑOZ MARTINEZ JHONATHAN	19 años	M	CT	TOMOGRAFIA_COMPUTADA_DE_CRANEO_SIMPLE	24/08/2020 06:39:58
36110095	FANNY IMBACHI ORTEGA MARIA	69 años	F	DX	TIBIA/FIBULA: 2 VISTAS	24/08/2020 06:56:44

VISUALIZAR IMAGENES

Una vez realizado el filtro deseado e identificado el estudio, ingresamos a visualizar las imágenes dando clic en el icono que se encuentra al frente del estudio requerido.  El cual despliega el visor de imágenes diagnósticas

Número identificación

10073

Nombre Modalidad Fecha inicial Fecha final

Registros por página

Identificación	Paciente	Edad	Género	Modalidad	Descripción	Fecha	
10073	MADRIGALES	69 años		CT	TOMOGRAFIA_COMPUTADA_DE_TORAX	24/08/2020 06:11:38	
10073	MADRIGALES	69 años		DX	PORT: CXR	24/08/2020 00:48:29	

Mostrando 1 a 2 de 2 registros

VISOR

Este permite la visualización de las imágenes del estudio seleccionado y su gestión mediante las herramientas disponibles en la parte superior.




HERRAMIENTAS

A continuación se listan las herramientas básicas

- Acerca o aleja la imagen 
- Controla el contraste 
- Mueve la imagen a la posición deseada 
- Mide una estructura en milímetros 
- Crea una anotación temporal en el área seleccionada 

En la opción **Más** encontrara mas herramientas disponibles.

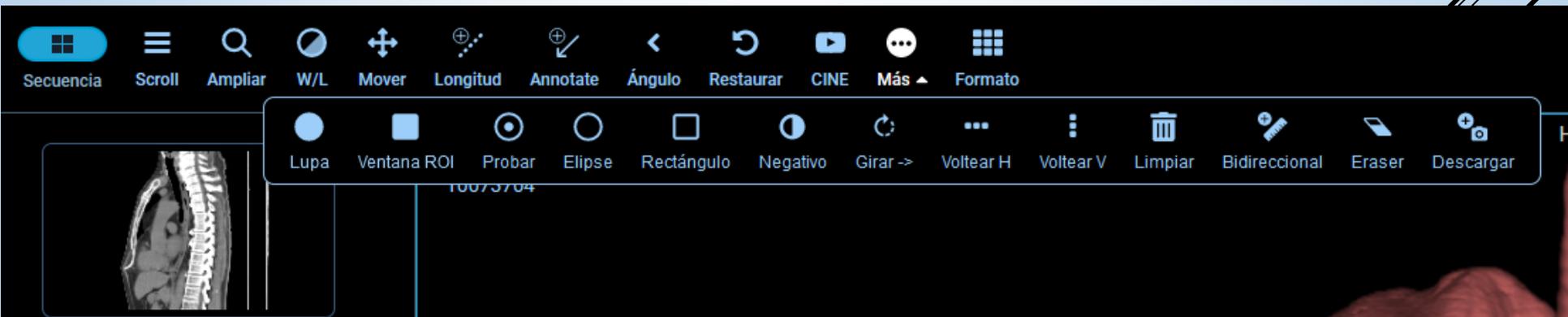

SOPORTE

EasyView cuenta con soporte técnico 24/7 mediante los siguientes canales de comunicación.



Genere su requerimiento mediante el siguiente link.



<http://170.254.231.26/helpdesk>

soporte@solucionescorporativasfm.com

315 4117582